

Angaben lt. Medizinproduktegesetz	
<i>Pflichtangaben nach Medizinproduktegesetz und §§ 5a, 5b UWG</i>	
Blasenpflaster	
Bezeichnung des Medizinproduktes	Blasenpflaster
Hersteller mit Adresse	Pharmplast, Amria Free Zone, 23512, Alexandria, Ägypten
Anwendungsbereich/ Wirkung	Blasenpflaster mit Hydrokolloid zur Abdeckung und zur Vermeidung von Blasen
Anwendungshinweise	Blasenpflaster Schutzpapier entfernen und das Pflaster auf eine gereinigte, trockene und fettfreie Hautstelle anbringen. Pflaster auf der Hautstelle belassen, bis es sich von selbst löst. Um das Pflaster vorzeitig zu entfernen, kann dieses mit warmem Wasser angefeuchtet werden.mit Hydrokolloid zur Abdeckung und zur Vermeidung von Blasen
Hinweis zur Aufbewahrung	Trocken und vor Sonne geschützt bei 0° - 40° C aufbewahren.
etwaige Warnhinweise	BlasenpflasterBei Rötungen, Schwellungen oder anhaltenden Schmerzen sowie vor Anwendung bei Diabetes oder Durchblutungsstörungen bitte einen Arzt aufsuchen. Nicht bei infizierten oder stark blutenden Blasen oder Verbrennungen 3. Grades anwenden.ter mit Hydrokolloid zur Abdeckung und zur Vermeidung von Blasen
Verkaufseinheiten	6 Stück je Packung

Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.