

STERILER

Wundverband

Wasserfest

Zur Versorgung und hygienischen Abdeckung von Hautverletzungen und Wunden, bspw. auch nach kleineren operativen Eingriffen. Der Wundverband aus wasserfestem, transparenten PU-Material und breit umlaufender Klebezone bietet einen hohen Tragekomfort, verklebt nicht mit der Wunde und lässt sich ohne Kleberrückstände wieder von der Haut lösen.

15 Stück in 2 Größen: (5x 80 x 100 mm, 10x 50 x 72 mm), einzeln verpackt

Größe der Wundaufgabe: 25 x 35 mm (kleines Pflaster), 45 x 60 mm (großes Pflaster)

Anwendung:

1. Reinigen Sie vorsichtig die Wunde und achten darauf, dass die umliegende Hautpartie trocken, fettfrei und sauber ist.
2. Entnehmen Sie den Wundverband aus der Einzelverpackung.
3. Ziehen Sie den Wundverband der Größe 100 x 80 mm vorsichtig auseinander, so dass sich die Schutzpapiere mit der Markierung 3 entlang des Wellenschnitts voneinander lösen. Bei der Größe 50 x 72 mm entfällt dieser Schritt.
4. Ziehen Sie das Schutzpapier mit den Markierungen 1 und 2 von der Klebefläche ab.
5. Legen Sie den Verband auf und achten hierbei auf einen faltenfreien Sitz. Ziehen Sie die Schutzpapiere mit der Markierung 3 ab und drücken das Pflaster vorsichtig an. Es wird empfohlen, den Wundverband einmal täglich zu wechseln.

Warnhinweise:

Nicht bei entzündeten oder stark nässenden bzw. blutenden Wunden sowie Verbrennungen dritten Grades verwenden.

Kleber enthält Polyacrylat.



Pharmplast S.A.E.
Amria, Free zone 23512,
Alexandria, Egypt.
www.pharmplast-online.com

EC REP
E C Rep Ltd,
5 Fitzwilliam Square East,
Dublin 2, D02 R744, Ireland.

Bellanda Medical GmbH
D – 36160 Dipperz, Maulkuppenstraße 16
 Tel.: 0049 6657 9140210



Text prepared 09082023

