

TRANSPARENTES

Blasenpflaster

mit Hydrokolloid

Vitalis Blasenpflaster sind anschmiegsam und komfortabel zu tragen. Sie nehmen Blasenflüssigkeit auf und schützen die Wunde vor Druck, Verschmutzungen und Bakterien. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.

Anwendung: Schutzpapier entfernen und das Pflaster auf eine gereinigte, trockene und fettfreie Hautstelle anbringen. Pflaster auf der Hautstelle belassen, bis es sich von selbst löst. Um das Pflaster vorzeitig zu entfernen, kann dieses mit warmem Wasser angefeuchtet werden.

Warnhinweise:

Bei Rötungen, Schwellungen oder anhaltenden Schmerzen sowie vor Anwendung bei Diabetes oder Durchblutungsstörungen bitte einen Arzt aufsuchen.

Nicht bei infizierten oder stark blutenden Blasen oder Verbrennungen 3. Grades anwenden.



 **Pharmaplast** S.A.E.
Amria, Free zone 23512,
Alexandria, Egypt.
www.pharmaplast-online.com


E C Rep Ltd,
5 Fitzwilliam Square East,
Dublin 2, D02 R744, Ireland.



Bellanda Medical GmbH
D – 36160 Dipperz, Maulkuppenstraße 16
Tel.: 0049 6657 9140210

