

148 mm

2专印刷 2024-05-31

PANTONE 199 C
PANTONE 300 C

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!



NACKENWÄRMER

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

Verwendungszweck:

Liefert therapeutische Wärme für vorübergehende Linderung leichter Muskel- und Gelenksbeschwerden und Schmerzen in Verbindung mit Überanstrengung, Zerrungen, Verstauchungen sowie Nackenschmerzen und sonstigen Krämpfen oder Verspannungen.

Modell:

12 Stunden konstante Wärmeleistung

Gebrauchsanweisung:

1. Wenn Sie das Produkt verwenden wollen, reißen Sie den Beutel auf und nehmen das Pad heraus. Warten Sie einige Minuten und halten Sie das Pad in der Hand, um die thermische Reaktion einzuleiten. Legen Sie das Pad in die spezielle Tasche im Fleeceschal.
2. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
3. Für maximale Wirksamkeit empfehlen wir, das Produkt 12 Stunden lang zu tragen. Tragen Sie es nicht länger als 12 Stunden. Tragen Sie es innerhalb von 24 Stunden nicht länger als insgesamt 12 Stunden.
4. Legen Sie die den SOS Nackenwärmer glatt auf Ihre Haut. Nicht falten oder knittern. Das erhöht die Gefahr von Verbrennungen.
5. Nur für einmaligen Gebrauch. Nach der Verwendung entsorgen.

Indikation:

SOS Nackenwärmer wurde speziell dafür entwickelt, Schmerzen in Verbindung mit Muskelbeschwerden, Steifheit, Verspannung, Muskelspasmen und Krämpfen sowie Nackenschmerzen und sonstige Krämpfe und Verspannungen zu lindern.

Gegenindikationen:

SOS Nackenwärmer sollte nicht bei Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber Temperaturextremen sind, wie z. B. Menschen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut. Bei der Behandlung von Kindern ist die Aufsicht eines Erwachsenen notwendig.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Kleinkindern und Tieren aufbewahren. Nicht in der Mikrowelle erwärmen. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Wegwerfprodukt. Dieses Produkt kann bei Personen mit empfindlicher Haut oder bei falscher Verwendung Juckreiz, Hautrötungen oder leichte Verbrennungen verursachen. Gehen Sie nicht mit dem SOS Nackenwärmer schlafen. Überprüfen Sie während der Verwendung regelmäßig Ihre Haut.

Fragen Sie vor der Verwendung einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Durchblutungsstörungen oder Herzkrankheiten, rheumatischer Arthritis leiden oder schwanger sind. Sollten Sie Hautirritationen oder Verbrennungen bemerken, entfernen Sie das Produkt umgehend.

Jede Zelle enthält Eisen, das beim Verschlucken schädlich sein kann. Wenn Sie etwas verschluckt haben, waschen Sie Ihren Mund mit Wasser aus und verständigen Sie den Giftnotruf. Nach Kontakt des Wärmepad-Inhalts mit Haut oder Augen, spülen Sie das betreffende Körperteil umgehend mit Wasser.

Wärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle auf oder versuchen, es erneut zu erhitzen, da die Wärmepads Feuer fangen könnten. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Während der Verwendung dieses Produkts: Überprüfen Sie Ihre Haut regelmäßig auf Anzeichen von Verbrennungen oder Blasen. Sollten Sie diese feststellen, beenden Sie die Verwendung. Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, beenden Sie die Verwendung. Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus. Um ein erhöhtes Verbrennungsrisiko zu vermeiden, entfernen Sie das Produkt, bevor Sie sich jeglicher Formen von MRT (Magnetresonanztomographie) unterziehen.

Nicht verwenden:

- wenn die Wärmeszelle undicht ist und/oder der Fleeceschal beschädigt oder gerissen ist.
- für eine längere Zeit als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden.
- in Kombination mit Schmerzsalben, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- bei ungesunder, geschädigter oder verletzter Haut.
- auf Hautarealen mit Schwellungen oder Hämatomen, die jünger sind als 48 Stunden.



- auf Hautarealen ohne Temperaturempfinden.
- in Kombination mit anderen Wärmequellen.
- bei Personen, die das Produkt nicht selbstständig entfernen können, einschließlich Kinder, Kleinkinder und manche ältere Menschen.
- bei Personen, die nicht in der Lage sind, alle Gebrauchsanweisungen zu befolgen.

Wann Sie die Verwendung beenden und einen Arzt fragen sollten:

Bei Schmerzen, die sich verschlimmern oder für mehr als 7 Tage anhalten. Bei Unwohlsein, Verbrennungen, Schwellungen, Ausschlägen oder sonstigen anhaltenden Hautveränderungen an der Tragestelle.

Transport und Aufbewahrung:

Das Produkt kann bei Raumtemperatur in trockener und gut gelüfterter Umgebung gelagert und transportiert werden.

Hauptmaterialien und Inhaltsstoffe:

Zusammensetzung Wärmepad: Eisen, Wasser, Kieselsäure, Aktivkohle, Natriumchlorid
Nackenbinde (Fleeceschal): Polyester und Elasthan

Verfallsdatum: 3 Jahre

Inhalt:

1 Fleeceschal (59 x 13 cm) +
3 Wärmepads (13 x 9 cm)

Autorisierter Vertreter in Europa:

Prolix GmbH
Brehmerstraße 56
D-40239 Düsseldorf



DISTRICON GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
D-60549 Frankfurt

Hersteller:

Koolcare Technology Co., Ltd
No. 6-10, A5, Shandong International
Tech Park South, Waihuan Road, Linyi
276017 Shandong, P. R. China
Werk: Wenv Healthcare Park
No.18, Zhenbei Road, Xinyi City
221400 Jiangsu, P. R. China



Stand der Information: 04.2023

www.sos.de

Bedeutung der Symbole auf der Packung:

- Hersteller
- Herstellungsdatum
- Trocken lagern
- Vertrieb
- Lagertemperatur
- Vor Sonnenlicht schützen

Achtung! Verweis auf Warnhinweise in Gebrauchsanweisung

Nicht wiederverwenden

Autorisierter Vertreter in Europa

Chargennummer

Verfallsdatum

eindeutige Produktidentifikationsnummer

587_REV01/G01

210 mm

Druckfarben / Print Colors:

PANTONE 199 C
PANTONE 300 C

Format:

Breite 148 mm x Höhe 210 mm (DIN A5)

Schriftgröße:

7,5 pt (x-Höhe = 1,34 mm)

_24W00861 BPZ Nackenwaermer 3St.indd, 13.05.2024, 11:10 Uhr

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reizezeichnung als endgültige und für beide Seiten verbindliche Fassung genehmigt. **Schutzrechte:** Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbeginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farberbindlich! **EAN-Code:** Für die Richtigkeit und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von uns eingesetzten Farbe. **Fehlerprüfung:** Alle Maße der angelegten Reizezeichnungen sind zu prüfen, da mit der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreibfehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. **Andruck/Proof:** Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbabweichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

WindStar Medical GmbH, Bessie-Coleman-Straße 13, 60549 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 6540272-101, Fax: +49 (0)69-6540272-102

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. **Property Rights:** The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibility. Furthermore, we request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! **EAN-Code:** The ultimate responsibility for the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-Code in the colour inserted by us. **Error-examination:** All measures of the applied final artwork/layout are to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). **First proof print/proof:** As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does neither contain an examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which you have to examine, as mentioned above.

Druckfarben / Print Colors:

PANTONE 199 C
PANTONE 300 C

Format:

Breite 148 mm x Höhe 210 mm (DIN A5)

Schriftgröße:

7,5 pt (x-Höhe = 1,34 mm)

_24W00861 BPZ Nackenwaermer 3St.indd, 13.05.2024, 11:10 Uhr

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reizezeichnung als endgültige und für beide Seiten verbindliche Fassung genehmigt. **Schutzrechte:** Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbeginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farberbindlich! **EAN-Code:** Für die Richtigkeit und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von uns eingesetzten Farbe. **Fehlerprüfung:** Alle Maße der angelegten Reizezeichnungen sind zu prüfen, da mit der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreibfehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. **Andruck/Proof:** Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbabweichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

WindStar Medical GmbH, Bessie-Coleman-Straße 13, 60549 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 6540272-101, Fax: +49 (0)69-6540272-102

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. **Property Rights:** The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibility. Furthermore, we request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! **EAN-Code:** The ultimate responsibility for the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-Code in the colour inserted by us. **Error-examination:** All measures of the applied final artwork/layout are to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). **First proof print/proof:** As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does neither contain an examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which you have to examine, as mentioned above.