

# Wundkompressen – steril

## Gebrauchsanweisung / Anwendung

Sterile und verklebungsarme Wundkomresse, beidseitig anwendbar zur Behandlung von Riss-, Schnitt- und Schürfwunden. Zur Anwendung im privaten, nicht professionellen Bereich. Die Komresse hat einen hochsaugfähigen Kern zur Aufnahme von Wundsekret und ist beidseitig mit einer dünnen, fein perforierten Polyethylen-Schicht bedeckt, so dass die Komresse beidseitig angewendet werden kann. Sie ist verklebungsarm und schmerzfrei wechselbar. Vor der Anwendung die Wunde z.B. mithilfe eines Wundsprays gründlich säubern und mit einer sterilen Komresse vorsichtig abtupfen. Anschließend eine neue Komresse verwenden, auf die Wunde legen und mit einer Binde fixieren.

## Warnhinweise beachten!

Nur zur äußeren Anwendung vorgesehen. Komresse bei der Entnahme aus der Verpackung am äußeren Rand oder mit einer Pinzette anfassen, damit die Sterilität erhalten bleibt. Die Komresse muss regelmäßig gewechselt werden und darf nicht wiederverwendet werden. Wenn die Verpackung beschädigt ist, nicht verwenden. Bei Hautirritationen oder ausbleibender Wundheilung bitte einen Arzt aufsuchen. Bei schwerwiegenden Vorfällen den Hersteller und die zuständige Behörde informieren.

**Material:** Saugkern aus Viskose/Polyester mit Polyethylen-Folie beschichtet

**Inhalt:** 10 Stück 7,5 cm x 7,5 cm



Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.  
No. 1, Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town,  
213144, Changzhou City, Jiangsu Province  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


PS/OS-LAN: TS0072/TS0074



2024-XX-XX



CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/ Horacio Lengo N°18, CP29006 Málaga, Spain  
www.cmcmedicaldevices.com

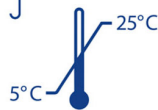

2029-07-01

**UDI** 6959793312224

Importeur:  
PS Product Services GmbH  
Alte Heerstraße 6  
53757 St. Augustin  
info@product-services.de

**LOT** 2024-07-01



0123



Stand der Information: REV1/2024-02-01